

WIP'ANIOS Premium

- 100% bioloji parçalanan viskoz salfetlər.
- Hopdurulmuş məhlulun tərkibində ətir və spirt yoxdur.
- Geniş antimikrob spektrə malikdir



İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Dezinfektant məhlul hopdurulmuş WIP'ANIOS PREMIUM salfetləri, tibbi alətlərin və inventarın silinməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

- Tərkibi: 100% viskoz (spunlace 50 qr/m²)
- Salfetin ölçüsü: 180 x 200mm
- Hopdurulmuş məhlul: hər salfetə 5 ml SURFA'SAFE

KİMYƏVİ TƏRKİBİ

Hopdurulmuş məhlulun tərkibinə didesildimetilammonium xlorid, xlorhidrat poliheksametilen biquanid, kation və amfoter sufaktan, ayırıcı maddə və köməkçi maddələr daxildir.

BİRDƏFƏLİK SALFET



WIP'ANIOS Premium


İSTİFADƏ TƏLİMATI



Salfeti çıxardıqdan sonra paketin qapağını bağlayın.



Salfetlə təmizlənəcək sahəni silin. Lazım gələrsə ikinci salfətdən istifadə edin. Təmas müddəti silinəcək sahənin çirklənmə dərəcəsindən asılıdır.

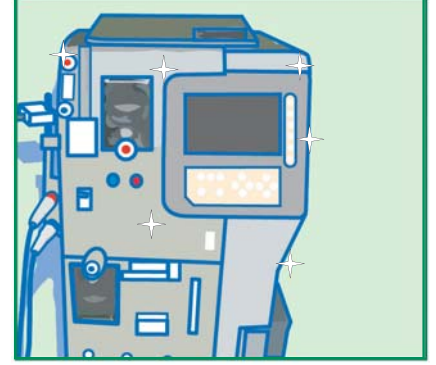

Qurumanı gözləyin. Su ilə durulamağa ehtiyac yoxdur (seliklə təmas istisna olmaqla). Hər istifadədən sonra paketin bağlı olduğundan əmin olun.

Eyni salfeti 2-ci dəfə istifadə etməyin. Desinfektant təsirini uzun müddət saxlamır.

MIKROBİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Mikroorqanizm	Standart	Təmas müddəti
Bakteriya	EN 1040, EN 1m3727, EN 13697	2 dəq
	MRSA according to EN 13697	2 dəq
Mikobakteriya	Mycobacterium tuberculosis (Tb)	15 dəq
Göbələk	EN 1275, EN 13624, EN 13697	5 dəq
	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 dəq
Virus	HIV-1, BVDV (surrogate of HCV), PRV (surrogate of HBV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpəsvirus, VRS	1 dəq

İSTİFADƏ TƏDBİRLƏRİ

İstifadədən əvvəl təlimatla tanış olun (Direktiv 99/45/EC). Saxlanma temperaturu: +5°C +35°C. Tibbi cihaz sinfinə aid edilir IIb (Direktiv 93/42/EEC)

QABLAŞDIRMA FORMASI

- 6 şaştet 100 salfet.....Réf. 2088.655
- 12 şaştet 50 salfet.....Réf. 2088.424

